



Kühl-Schmerz-Pflaster

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

Das SOS Kühl-Schmerz-Pflaster besitzt kühlende und schmerzlindernde Eigenschaften. Das Spektrum möglicher Anwendungen erstreckt sich von Sportverletzungen über Kopfschmerzen, Migräne und Fieber. Der als angenehm empfundene Kühleffekt führt zu einer Schmerzlinderung über einen Zeitraum bis zu 8 Stunden. Die rutschfesten Gel-Pflaster bieten einen angenehmen Tragekomfort und können je nach Bedarf zugeschnitten werden. Das Besondere: Die SOS Kühl-Schmerz-Pflaster sind sofort einsatzbereit und erfordern vor der Anwendung keiner gesonderten Kühlung.

Anwendungsgebiet:

Schmerzlinderung durch Kühlung, insbesondere bei Migräne, Fieber, Kopfschmerzen und Sportverletzungen (z. B. Verstauchungen)

Gebrauchsanleitung:

Den Beutel aufschneiden oder aufreißen und ein Gel-Pflaster entnehmen. Die transparente Folie von der Rückseite des Gel-Pflasters entfernen und entsorgen. Das Gel-Pflaster auf die Haut auflegen. Falls gewünscht, kann das Gel-Pflaster mit einer Schere zur geeigneten Größe zurechtgeschnitten werden. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn jedes Gel-Pflaster nur einmal verwendet wird. Um ein Austrocknen zu verhindern, unbenutztes Gel-Pflaster im Beutel lagern und Beutel – wie auf der Rückseite des Beutels dargestellt – umfalten.

Warnhinweise:

Gezielte Schmerzlinderung durch Kühleffekt. Beim Kühl-Pflaster handelt es sich nicht um ein Medikament. Bei Gebrauch müssen die Anleitungen des Beipackzettels beachtet werden. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf verwundeter, gereizter, beschädigter, sonnenverbrannter oder sehr empfindliche Haut anwenden. Direkten Kontakt mit den Augen und Nasenöffnungen vermeiden. Das Gel-Pflaster klebt nicht auf nasser Haut oder bei Kontakt mit Haaren oder Kleidung. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat einholen. Anwendung bei Patienten mit körperlichen Einschränkungen und älteren Patienten nur unter sorgfältiger Überwachung. Anwendung bei Kindern nur unter elterlicher Aufsicht und nie das Kind mit dem Gel-Pflaster unbeaufsichtigt lassen. Die Gel-Pflaster sind nicht zur Senkung der Körpertemperatur vorgesehen.

Bei Hitzewellen oder Schweißausbrüchen könnten Sie Fieber haben. Daher ist es wichtig, die Körpertemperatur zu messen. Bei Kopfweh oder Hautausschlag oder einer Körpertemperatur über 39 °C müssen Sie ärztlichen Rat einholen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Nebenwirkungen oder eine allergische Reaktion erleben, z. B. starke Rötung, Reizung, brennendes Gefühl oder Beschwerden auf der Haut, die Anwendung beenden und ärztlichen Rat einholen.

Das Produkt nicht anwenden bei Personen mit einer Vorgeschichte von allergischen Reaktionen auf Medikamente oder Kosmetika.



Erstickungsgefahr:

Das Gel-Pflaster sollte keinesfalls auf oder über Nase und Mund aufgelegt werden oder so platziert werden, dass es versehentlich die Nase oder den Mund bedecken kann.

Lagerung:

An einem kühlen, trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen geschützt aufbewahren. Nicht im Gefrierfach lagern.

Bestandteile: Wasser, Methylparaben

Inhalt: 2 Gel-Pflaster à 13 x 5 cm

Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim








Hersteller:

 Dr. Kleine Pharma GmbH
Opalstraße 1, D-33739 Bielefeld



Stand der Information: Januar 2017
066_REV05/2018.08

Bedeutung der Symbole auf Packung:

-  Hersteller
-  Zum Einmalgebrauch
-  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
-  Trocken aufbewahren
-  Chargenbezeichnung
-  Verwendbar bis
-  Gebrauchsanweisung beachten

SOS unterstützt die:



Erste Hilfe bei Muskel- und Gelenkschmerzen