



Lippen-Herpes-Patch

Lippenherpes (Herpes labialis) wird durch einen Virus hervorgerufen. Erste Anzeichen sind Kribbeln und Rötungen im Bereich der Lippen, anschließend entstehen dort die charakteristischen Bläschen. Auslöser sind oft Stress, Erkältungen, Fieber, starke Sonnenbestrahlung oder kaltes Wetter.

SOS Lippen-Herpes-Patches fördern die Wundheilung bei Lippenherpesbläschen. Durch die Hydrokolloid-Technologie nach dem Prinzip der feuchten Wundheilung wird die Bläschen- und Narbenbildung verringert und der Bildung von Krusten und Schorf vorgebeugt. Rötungen, Juckreiz und Schmerzen werden effektiv gelindert.

Die fast unsichtbaren, atmungsaktiven Patches können leicht überschminkt werden. Sie bieten diskreten Schutz und reduzieren das Risiko weiterer Ansteckungen. Die besten Ergebnisse können erzielt werden, wenn das Patch bei den ersten Anzeichen von Juckreiz und Brennen angewandt wird. Verwenden Sie die Patches durchgehend tagsüber und nachts.

Anwendung:

1. Das Patch sollte auf gereinigter und trockener Haut aufgebracht werden. Nicht in Kombination mit Cremes oder Salben auf feuchter Haut anwenden, da dies die Klebkraft der Patches beeinträchtigen kann.
2. Lösen Sie ein einzelnes Patch mit Träger von der Karte. Entfernen Sie den größeren Teil des Trägers.
3. Verwenden Sie den in der Box integrierten Spiegel (vor der ersten Anwendung bitte Schutzfolie vom Spiegel entfernen), um den halb freigelegten Teil des Patches direkt über der von Lippenherpes betroffenen Stelle zu positionieren. Ziehen Sie den Rest des Trägers vorsichtig ab, um das Patch komplett zu platzieren.
4. Drücken Sie das Patch mit dem Finger leicht an, um eine gute Haftung der gesamten Fläche des Patches zu gewährleisten.

Wann sollte das Patch wieder entfernt werden?

Solange das Patch sich nicht von selbst zu lösen beginnt, sollte es nicht gewechselt werden. Wenn sich das Patch zu lösen beginnt oder Sie es gerne entfernen möchten, fassen Sie das Patch an einer Seite an und ziehen Sie es vorsichtig, so dass es sich dehnt und langsam von der Haut ablöst.

Zusammensetzung:

Hydrocolloid Adhesive Formulation H014, PU-Film

Hinweise:

Das Patch kann durch die Aufnahme von Wundflüssigkeit seine Farbe leicht verändern. Sollten Zeichen einer Infektion auftreten (z. B. Eiter, starker Geruch), unterbrechen Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt.

Warnhinweise:

Nur für den äußerlichen Gebrauch. Nicht anwenden, falls Sie allergisch gegen das Patch oder einen seiner Bestandteile sind. Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offenen oder entzündeten Wunden anwenden. Im Zweifel Rücksprache mit einem Arzt halten.

Hersteller:

DISTRICON GmbH
Am Joseph 15
D-61273 Wehrheim



Stand der Information:
2018.02

Für Experten-Video
QR-Code scannen:



Nicht wiederverwenden



Trocken aufbewahren



Temperaturbegrenzung



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Packungsbeilage beachten



Hotline

persönliche
Experten-Beratung:

0800 000 50 40

gebührenfrei (in Deutschland)