



Mund-Heil-Gel

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SOS Mund-Heil-Gel sorgt für schnelle Schmerzlinderung bei Entzündungen und kleinen Verletzungen im Mundraum (wie z. B. Aphten, Druckstellen durch Zahnspangen und Zahnersatz) und des Zahnfleisches. Das Gel legt sich wie ein schützender Film über die Wunde und bildet so eine Barriere vor äußeren Einflüssen (z. B. scharfem Essen, säurehaltigen Säften) und fördert die natürliche Wundheilung.

Anwendungsgebiete:

Gel zur Anwendung bei kleinen Verletzungen der Mundschleimhaut und bei Aphten.

Anwendung:

SOS Mund-Heil-Gel wird je nach Bedarf mehrmals täglich mit einem Wattestäbchen oder der gereinigten Fingerspitze auf die betroffene Stelle aufgetragen und kann bis zur vollständigen Heilung angewendet werden.

Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung die Hände gründlich mit Seife waschen und gut abtrocknen. Versuchen Sie nur wenig oder gar nicht mit der Zunge über den Bereich zu reiben, auf dem das schützende Gel aufgetragen ist. Beim Auftragen des Produktes den direkten Kontakt zwischen der Flasche und der Aphte vermeiden.

Nach dem Auftragen sollen Sie 30 Minuten nicht essen oder trinken.

Aufbewahrung:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

An einem kühlen Ort vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

Nicht anwenden bei beschädigter Verpackung.

Zusammensetzung:

Gereinigtes Wasser, Glycerin, Calcium/Natrium PVM/MA Copolymer, Xanthan gum, Cellulose gum, PVP, Polyacrylsäure, Natriumhydroxid, Aroma, Natriumhyaluronat, Phenoxyethanol, Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Butylparaben, Imidazolidinyl Urea, Allantoin

Warnhinweise:

Ausschließlich zur oralen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nur zur Behandlung kleiner Wunden im Mundraum. Bei länger anhaltenden Beschwerden suchen Sie ärztlichen Rat. Nicht anwenden bei Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren Inhaltsstoffen. Während der Schwangerschaft und Stillzeit fragen Sie vor der Anwendung dieses Produktes Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Kinder im Alter von 4–12 Jahren sollten bei der Anwendung des Produktes durch einen Erwachsenen überwacht werden. Vor der Anwendung bei Kindern unter 4 Jahren holen Sie ärztlichen Rat ein. Nicht in Kombination mit anderen Medikamenten zur Behandlung von Aphten anwenden. Das Produkt ist nicht zur Behandlung von mehr als 10 Aphten gleichzeitig geeignet. Wenn Sie an mehr als 10 Aphten leiden, holen Sie ärztlichen Rat ein. Vermeiden Sie ein Verschlucken des Produktes.



Inhalt: 10 ml

Hersteller:

DISTRICON GmbH

Am Joseph 15

D-61273 Wehrheim



Stand der Information:

046_REV03 / 2016.11

Bedeutung der Symbole auf Packung und Tube:



Hersteller



Haltbarkeit nach Anbruch
in Monaten (M)



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Vor Sonnenlicht schützen



Bitte Packungsbeilage beachten

Für Experten-Video

QR-Code scannen:

SOS unterstützt die:



kinder
not
hilfe



**persönliche
Experten-Beratung:**

0800 000 50 40

gebührenfrei (in Deutschland)



Effektiv gegen Lippenherpes

Das SOS Lippenherpes-Gel lindert Brennen und Juckreiz bei Lippenherpes und beschleunigt die Wundheilung.